



KROPSTERMOMETER

BRUGSANVISNING

Model: 100450935



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



Model: 100450935

Udgivelsesdato: 06.2025

INTRODUKTION

Tak for dit køb af dette pandetermometer & øre-infrarøde termometer.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, før du bruger termometeret, og opbevar det et sikkert sted til fremtidig reference.

FORORD

Det infrarøde termometer kan bruges til at måle kropstemperaturen via øret og panden. Det er egnet til voksne og børn (øretesttilstand kun for børn over 3 måneder).

Pakkens indhold

Nr.	Navn	Antal
1	Infrarødt termometer	1
2	Pose	1
3	Brugsanvisning	1
4	Manual	1

KROPSTERMOMETER

BRUGSANVISNING

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

1. Hold termometeret uden for børns rækkevidde (under 12 år).
2. Nedsenk aldrig termometeret i vand eller andre væsker (ikke vandtæt). Følg rengøringsvejledningen under afsnittet "Pleje og rengøring".
3. Brug aldrig termometeret til andre formål end dem, det er beregnet til.
4. Undgå direkte sollys og opbevar det i et rent, tørt og ventileret miljø ved en temperatur mellem 5°C - 40°C.
5. Brug ikke termometeret i høj luftfugtighed (>95% RH).
6. Brug ikke termometeret, hvis sensoren eller selve enheden er beskadiget.
7. Konsulter en læge, hvis du oplever symptomer som irritabilitet, opkastning, diarré, dehydrering eller kramper.
8. Feber kan indikere en alvorlig sygdom, især hos ældre, spædbørn og personer med svækket immunforsvar.
9. Dette termometer er ikke egnet til for tidligt fødte eller spædbørn med lav fødselsvægt.
10. Brug ikke termometeret som erstatning for en medicinsk vurdering.



PRODUKTBESKRIVELSE OVERSIGT

Det infrarøde termometer måler kropstemperaturen baseret på den infrarøde energi, der udsendes fra trommehinden eller panden. Brugeren kan hurtigt få et måleresultat efter korrekt placering af temperaturproben i øregangen eller på panden.

Normal temperatur efter måleområde.

Måleområde	Normal temperatur (°C)	Normal temperatur (°F)
Pande	36.1 - 37.5	97 - 99.5
Øre	35.8 - 37.5	96.4 - 99.5

KROPSTERMOMETER


BRUGSANVISNING

FUNKTIONER

- Magnetisk probedæksel og automatisk skift mellem pande- og ørefunktion.
- Hurtig måling på under ét sekund.
- Multifunktionel: kan måle både øre- og pandetemperatur.
- Nem betjening med én knap.
- 40 målinger gemt i hukommelsen.
- Skift mellem lydløs og med lyd.
- Visuel og lydmæssig feberalarm.
- Skift mellem °C og °F.
- Automatisk slukning for energibesparelse.
- Baggrundsbelysning med temperaturindikator.
- Patente teknologi til separat måling af voksne og børn.

PRODUKT BESKRIVELSE

- 1 – Display (se nedenfor).
- 2 – Tilstand- / hukommelses-knap.
- 3 – Måleknap / lydtilstand.
- 4 – Måler.
- 5 – Batteridæksel.
- 6 – Måler-dæksel (tages af for at måle øre-temperatur).

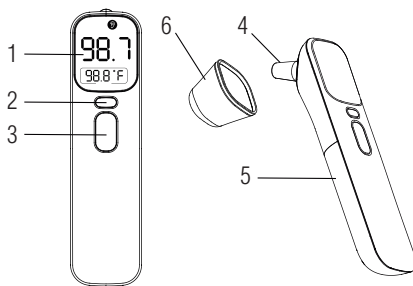


KROPSTERMOMETER

BRUGSANVISNING

DISPLAY BESKRIVELSE

Displayindikatorer

1. Voksen pande.
2. Børne pande (under 12 år).
3. Øre.
4. Indstillinger.
5. Fahrenheit/Celsius skala.
6. Sidst målte temperatur.
7. Lavt batteriniveau.
8. Lydløs/med lyd.
9. Aktuell temperaturværdi.

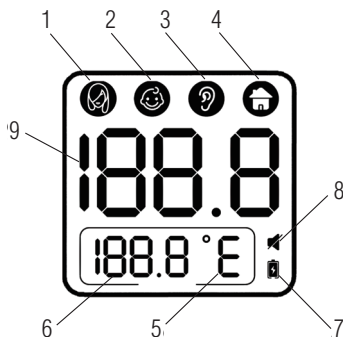



BRUG AF TERMOMETERET

FOR AT UNDGÅ UNØJAGTIGHEDER

- Brug termometeret i et rum uden kraftig luftstrøm.
- Undgå intens fysisk aktivitet før måling.
- Hvis termometeret flyttes mellem miljøer med forskellige temperaturer, vent 30 minutter før måling.
- Hold ikke termometeret i hånden i længere tid, da det er følsomt over for varme.
- Sørg for, at linsen er ren.

VÆLG LYD-TILSTAND

Når termometeret er tændt; hold Måleknop nede i 5 sekunder for at skifte til lydløs tilstand – og det samme for at aktivere lyd igen.


TJEK TIDLIGERE MÅLINGER I HUKOMMELSEN;

Hold tilstandsknappen nede i 5 sekunder. Tryk herefter på tilstandsknappen kort for at skifte og se op til 40 tidligere målinger.

Termometeret går tilbage i almindelig tilstand ved ingen tryk.

CELSIUS / FAHRENHEIT

Vælg temperatur-enhed ved hjælp af den lille skydeknop i batteri-rummet;

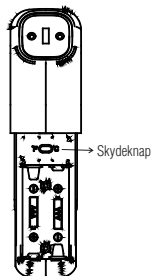

KROPSTERMOMETER

BRUGSANVISNING

AUTOSLUK



Termometeret slukker af sig selv ved 13 sekunders inaktivitet.

MÅLING AF PANDETEMPERATUR

1. Tænd for termometeret.
2. Vælg pande-tilstand (voksen eller barn).
3. Hold måleren 0-3 cm fra panden.
4. Tryk på måleknappen og slip inden for ét sekund.
5. Aflæs værdien på displayet.

MÅLING AF ØRETEMPERATUR

1. Sørg for, at øret er rent og frit for voks.
2. Træk forsigtigt øret tilbage for at rette øregangen ud.
3. Fjern målerdækslet og indsæt forsigtigt termometeret i øret.
4. Tryk på måleknappen og slip inden for ét sekund.
5. Aflæs værdien på displayet.

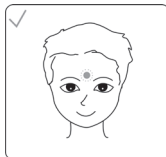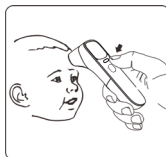



FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Brug en alkoholserviet til at rengøre måleren efter hver brug.
- Opbevar termometeret et tørt sted.
- Undgå stød og slag, da dette kan beskadige præcisionskomponenterne.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Måleområde: 32.0°C – 42.9°C (89.6°F – 109.2°F).
- Hukommelse: 40 målinger.
- Batteri: 2x AAA (kan bruges over 3000 gange).
- Automatisk slukning: Efter 13 sekunder.
- Driftstemperatur: 5°C - 40°C (41°F - 104°F).

KROPSTERMOMETER

BRUGSANVISNING

Symbol	Beskrivelse
	Type BF anvendt del
	Information om fabrikanten
	Læs manualen omhyggeligt
	Bortskaffelse af dette produkt og brugte batterier skal ske i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for bortskaffelse af elektroniske produkter
	Produktionsdato
LOT	Batch nummer
	Vigtigt! Målinger kan være ukorrekte, hvis produktet beskadiges eller bruges forkert
IP22	IP klasse; 2: Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere 2: Beskyttet mod vanddråber ved hældning på maksimalt 15 grader.
	CE Mærket. Produktet overholder de Europæiske krav.
	EU Repræsentant
	Holdes væk fra sollys
	Opbevar og transporter forsigtigt
	Holdes tør
	Denne side op



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S,
Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

